
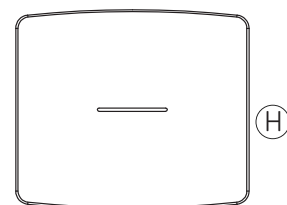
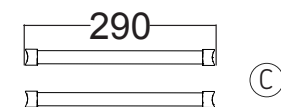
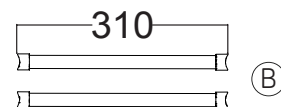
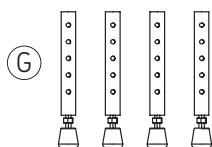
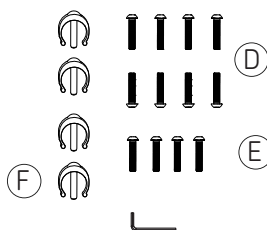


Notice d'installation

Siège de Douche Réglable sur Pied


S'ASSURER QUE TOUTES LES PIÈCES SONT PRÉSENTES ET INTACTES AVANT LE MONTAGE

CONTENU DE LA BOÎTE

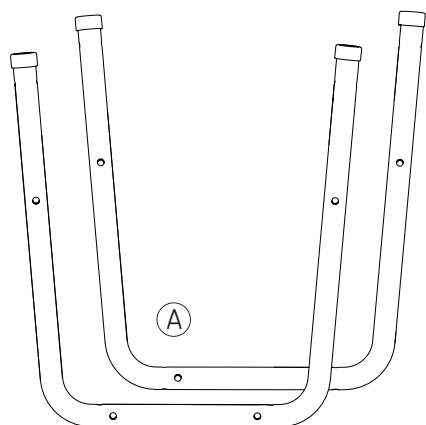


Montage


Étape 1

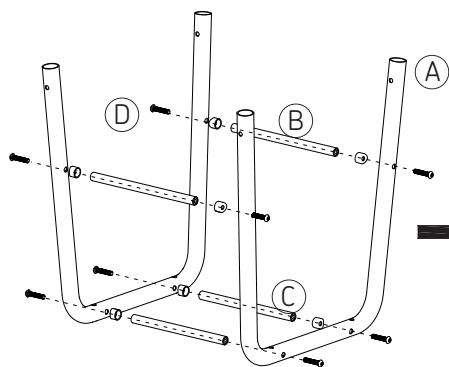

Étape 2

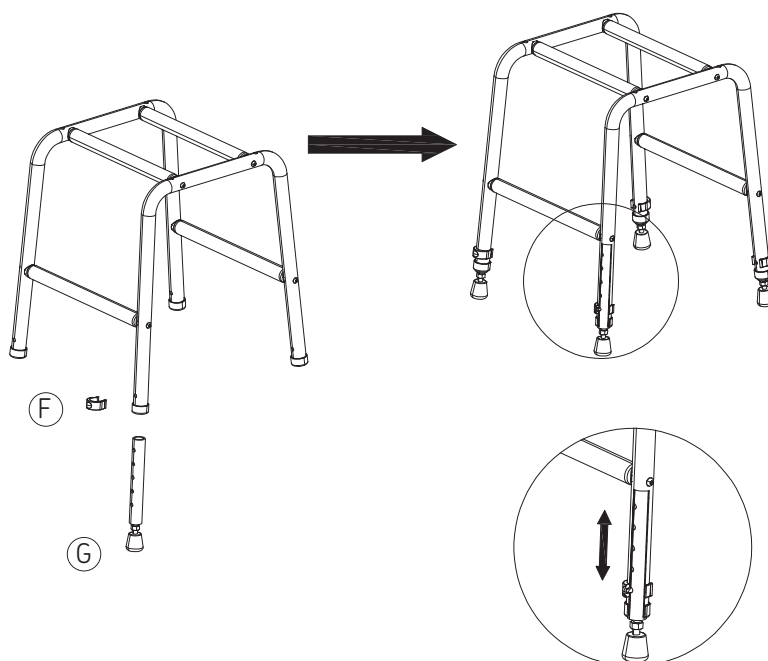

Étape 3

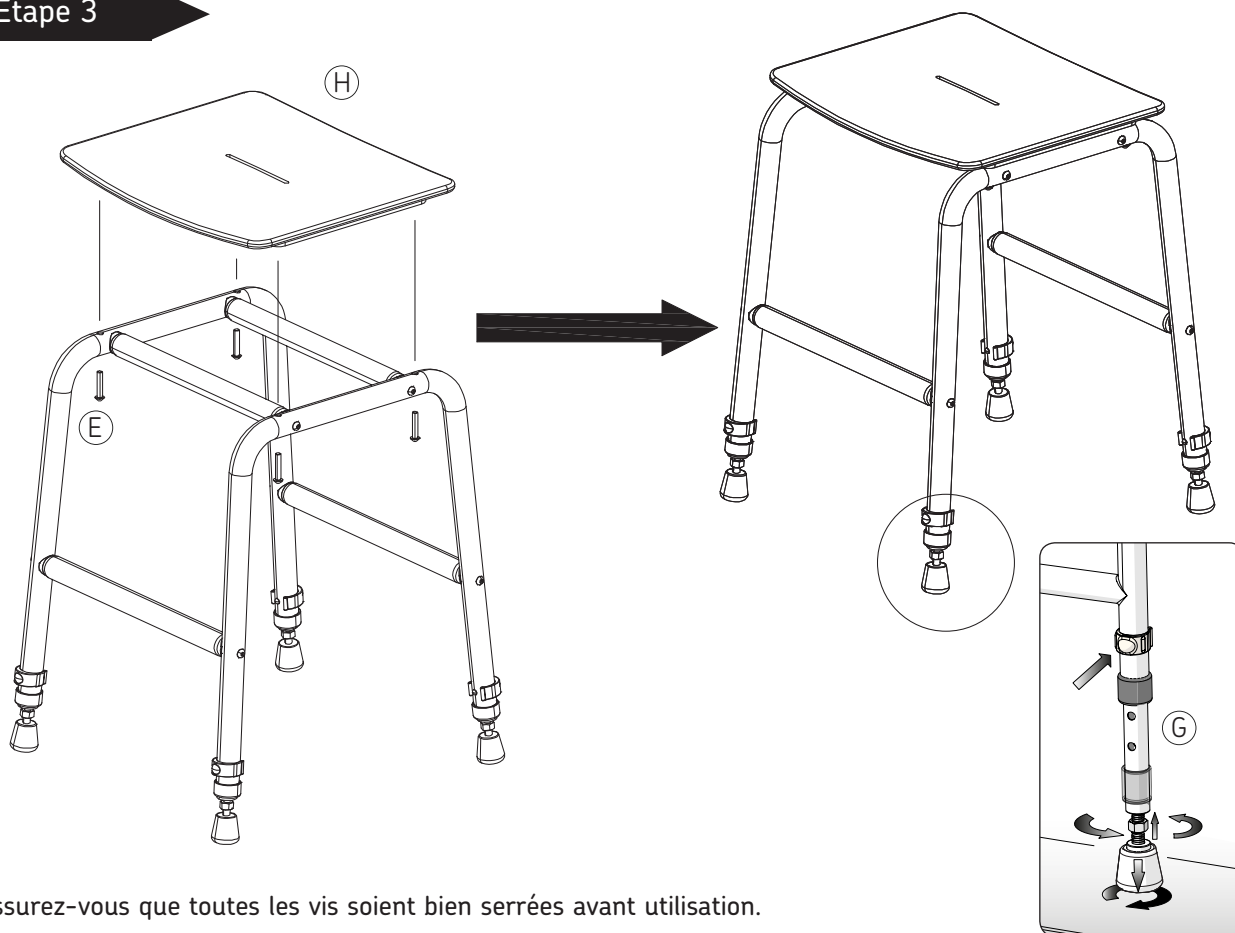

Assurez-vous que toutes les vis soient bien serrées avant utilisation.

Instructions d'entretien et nettoyage

Il est recommandé de nettoyer à l'aide d'un savon liquide sans ammoniaque pour éliminer toutes taches à la surface ou taches d'eau. Rincez bien toutes les traces de savon. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer et essuyer le siège et les supports métalliques.

N'utilisez pas d'éponges métalliques ou à récurer, ni de nettoyeurs abrasifs qui pourraient endommager la finition de surface.

ATTENTION !!! : La charge maximale est de 120 kg

Consultez un professionnel médical pour obtenir des conseils et des instructions spécifiques à vos besoins avant utilisation.

Ne modifiez pas ce produit en aucune façon.

Une fois installé, vérifiez le siège périodiquement afin de vous assurer que toutes les vis restent bien serrées.

AKW garantit votre produit avec une garantie à vie à compter de la date d'achat. La garantie à vie couvre uniquement les défauts matériels ou de fabrication et ne concerne pas l'utilisation inappropriée, l'usure normale ou les dommages accidentels. Elle ne couvre pas les dommages ou défauts qui résultent d'une mauvaise installation, d'une mauvaise utilisation, d'un dommage accidentel ou d'un manque d'entretien (y compris l'accumulation de saleté, la poussière ou les débris d'origine hydrique) ; ni les dommages résultant d'un nettoyage inapproprié ou d'infiltration d'eau; ni les dommages ou défauts qui résultent de réparations, les dommages liés au gel, les modifications effectuées par des personnes non autorisées, qui ne sont pas des installateurs ou des techniciens de maintenance. Cette garantie exclut l'usure normale du produit et ne s'applique pas aux traitements de surface.

Ces instructions sont données pour indiquer les normes minimales d'installation et quelle est la meilleure pratique pour l'installation. En raison de la très grande variabilité des conditions d'installation possibles, AKW ne peut pas fournir toutes les circonstances pour l'installation. AKW ne peut accepter aucune responsabilité en relation avec cette information ou son utilisation. Cette information est fournie à la condition que la personne qui la reçoit fasse ses propres tests pour déterminer l'aptitude à l'emploi. La non-installation de ce produit AKW conformément aux instructions fournies ou à la modification non autorisée invalidera toute garantie et pourrait affecter la sécurité du produit. Aucun de ces éléments n'affecte vos droits statutaires.

Si vous n'installez pas ce produit AKW conformément aux instructions fournies ou si vous procédez à des modifications non autorisées, ceci annule toute garantie et aura une incidence sur la sécurité des produits.

Tél. Europe
0032 68 33 48 99

Tél. France
09 72 29 24 05

Fax 0032 68 33 16 58
Email : ism@akw-medicare.com