


Serie 1600

Barres ergonomiques

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

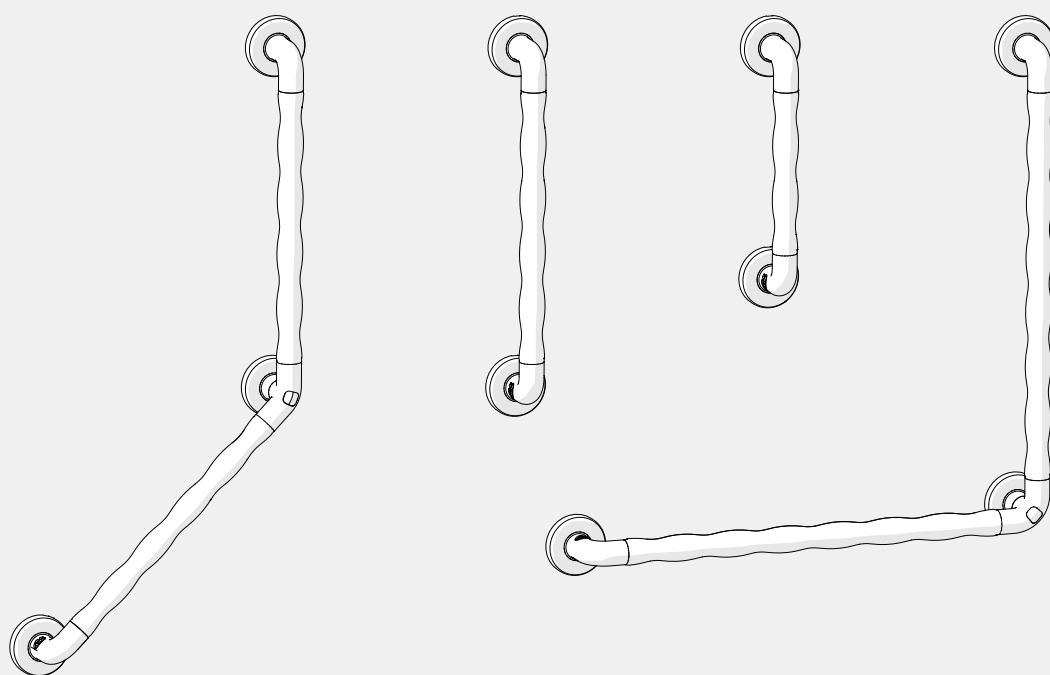

L'installation doit être effectuée conformément à ces instructions, et doit être réalisée par un installateur compétent.

Important





Avant de fixer quoi que ce soit aux murs, assurez-vous que la construction de ce type de mur est capable de supporter le poids maximal de l'unité chargée et que les fixations et accessoires appropriés sont utilisés pour ce type de mur. Les fixations murales ne sont pas fournies.

Il est recommandé d'utiliser tous les trous de fixation du support. N'utilisez pas de vis à tête fraisée.


Avant de commencer

Retirez toute enveloppe de protection et examinez attentivement le produit. Vérifiez que tous les éléments sont présents avant de jeter l'emballage. Veuillez informer immédiatement le détaillant de tout dommage ou défaut. Le fabricant ne peut être tenu responsable des coûts d'installation qui pourraient résulter de l'installation de produits endommagés ou défectueux et non conformes à ces instructions. Conservez les petites pièces et l'emballage hors de portée des enfants et éliminez tous les emballages conformément aux autorités locales chargées du recyclage.


Pour les barres d'appui avec deux supports muraux, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

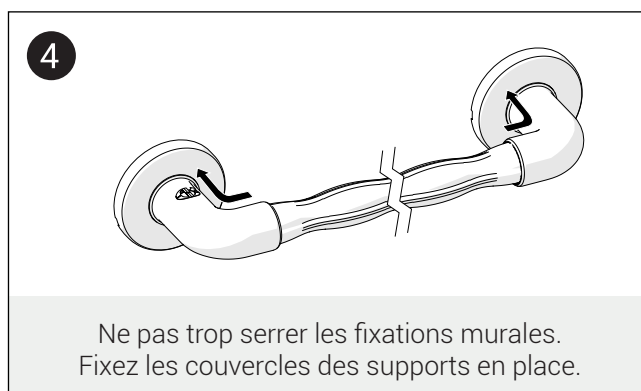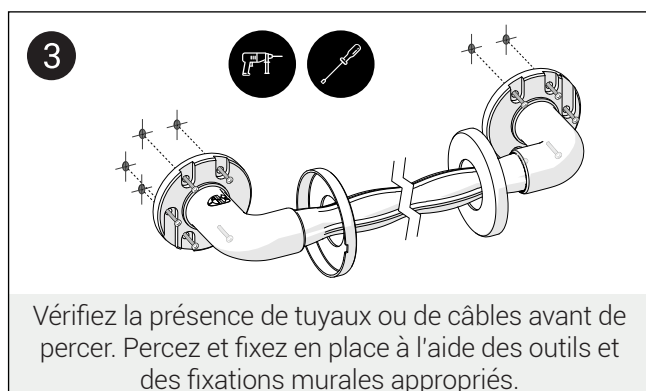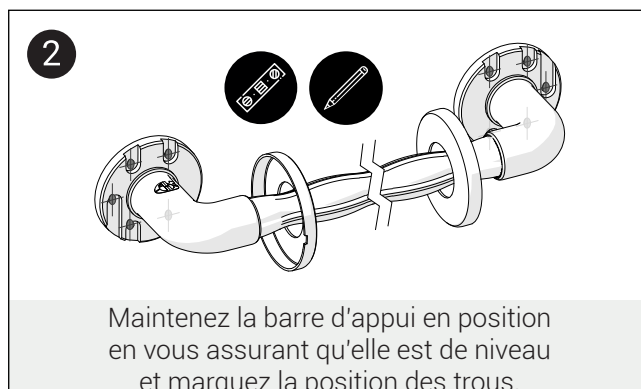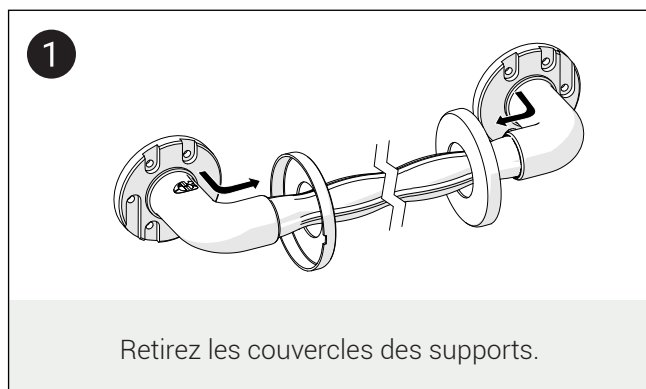


Pour les barres d'appui avec trois supports muraux ou plus, vous rencontrerez certains des coudes suivants :

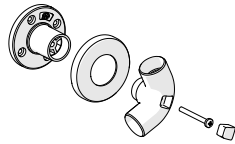

Coude à 90°

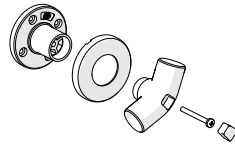

Coude à 135°

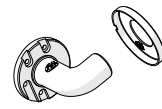

Coude d'extrémité

Commencez par installer le(s) coude(s) du milieu vers l'extérieur, en veillant toujours à ce que la barre soit de niveau.

Produit	Diamètre	Longueur*	Hauteur**	Coloris	Référence
Barre d'appui ergonomique 300mm	32mm	300mm	46mm	White Blue	01600WH 01600BU
Barre d'appui ergonomique 300mm	35mm	300mm	46mm	White Blue	01650WH 01650BU
Barre d'appui ergonomique 450mm	32mm	450mm	46mm	White Blue	01610WH 01610BU
Barre d'appui ergonomique 450mm	35mm	450mm	46mm	White Blue	01660WH 01660BU
Barre d'appui ergonomique 600mm	32mm	600mm	46mm	White Blue	01620WH 01620BU
Barre d'appui ergonomique 600mm	35mm	600mm	46mm	White Blue	01670WH 01670BU
600x600mm barre ergonomique coudée (90°)	32mm	600x600mm	46mm	White Blue	01630WH 01630BU
450x450mm barre ergonomique coudée (135°)	32mm	450x450mm	46mm	White Blue	01640WH 01640BU
450x450mm barre ergonomique coudée (135°)	35mm	450x450mm	46mm	White Blue	01690WH 01690BU

* Distance entre le centre des supports muraux. ** Distance entre le mur et la barre.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT ET INFORMATIONS SUR LES DONNÉES

Poids maximal de la charge :

Série 1600 barre d'appui ergonomique 19.5 stone (125kg)
La charge pondérale se réfère à la barre d'appui uniquement,
appliquée pendant moins de 30 minutes sur une période de 60 minutes.
Les fixations et la rétention dans la surface de montage sont la responsabilité de l'installateur.

Plage de température de fonctionnement standard : -5°C à +35°C.

Matériaux de construction :

Supports : PP | Couvercles de support : PP | barres : PP - Inserts en acier inoxydable 304

Contact Us



Informations générales

0032 68 33 48 99

01 74 74 33 85

Fax

0032 68 33 16 58

Site

www.akw-medicare.com

E-Mail

ism@akw-medicare.com

AKW

29E rue de la Terre à brique

7522 Marquain

Belgique

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :



Garantie

La garantie à vie s'applique uniquement aux défauts de fabrication ou de matériaux, à condition que le produit soit installé correctement une seule fois.

Elle ne s'applique pas à :

- L'utilisation inappropriée ou les dommages accidentels.
- Dommages ou défauts résultant d'une installation incorrecte.
- Le manque d'entretien, y compris l'accumulation de saleté ou les dommages résultant d'un nettoyage inapproprié.
- Les dommages ou défauts résultant de réparations ou de modifications effectuées par des personnes non autorisées.
- Cette garantie exclut l'usure générale due à l'utilisation et ne s'applique pas aux finitions de surface.

Que faire en cas de problème ?

Si vous rencontrez un problème avec ce produit, veuillez contacter votre installateur local. Si le problème n'est pas résolu, contactez le service d'information technique AKW qui pourra vous donner des conseils supplémentaires et, si nécessaire, faire venir un technicien de maintenance pour signaler tout problème. Pour plus d'informations, consultez les CGV sur notre site Web ou notre catalogue. Rien de ce qui précède n'affecte vos droits statutaires.