


Siège de douche Rugao

NOTICE D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN



Merci de lire attentivement cette notice et de la laisser chez le client final pour future référence et car il contient des informations importantes sur la garantie

Informations Importantes

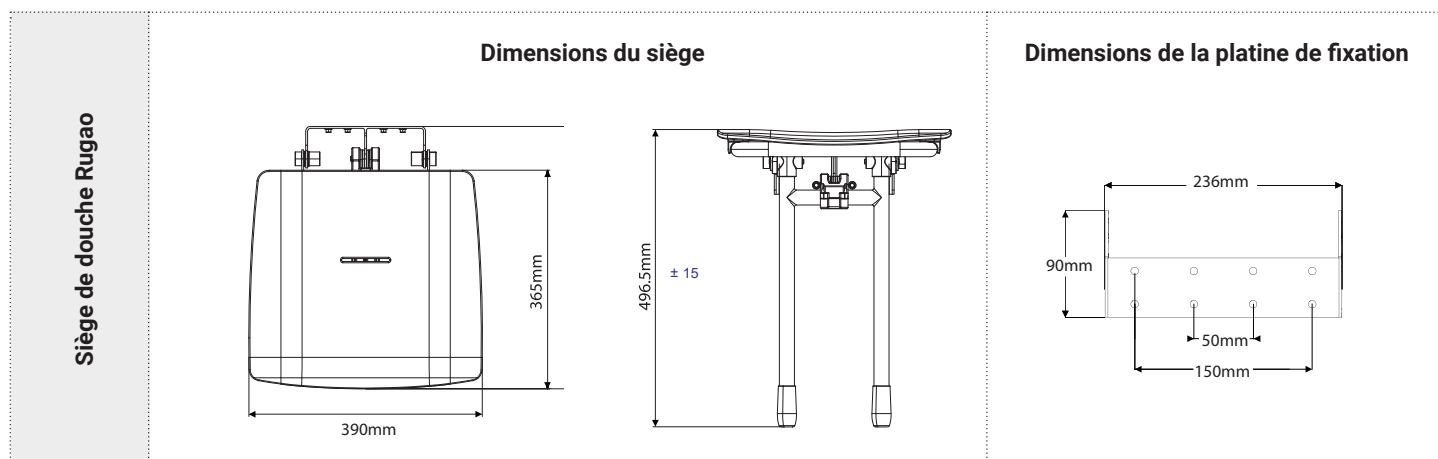

Couleur:
Blanc RAL 9003 - 02020WH
Gris RAL 7043 - 02020GR

Utilisation à l'intérieur

**Ne jamais dépasser la charge
maximale de 200 kg.**

Si vous n'installez pas ce produit AKW conformément aux instructions fournies ou si vous procédez à des modifications non autorisées, ceci annule toute garantie et aura une incidence sur la sécurité du produit.

Ce siège doit être fixé à une surface verticale à l'aide de fixations appropriées pour le type de surface et de chargement à appliquer.


Ajustez les pieds de support et s'assurez que les pieds soient sur une surface plane quand le siège est en position abaissée (maximum 1:40 inclinaison du bac de douche).

Les surfaces courbées comme les angles de baignoire ne sont pas acceptables.

Assurez-vous que le siège n'est pas en contact avec d'autres produits quand il est levé ou abaissé.

Veillez à ne pas endommager la surface.

Assurez-vous qu'il n'y ait pas de câbles électriques ou de tuyauterie cachées dans le mur.

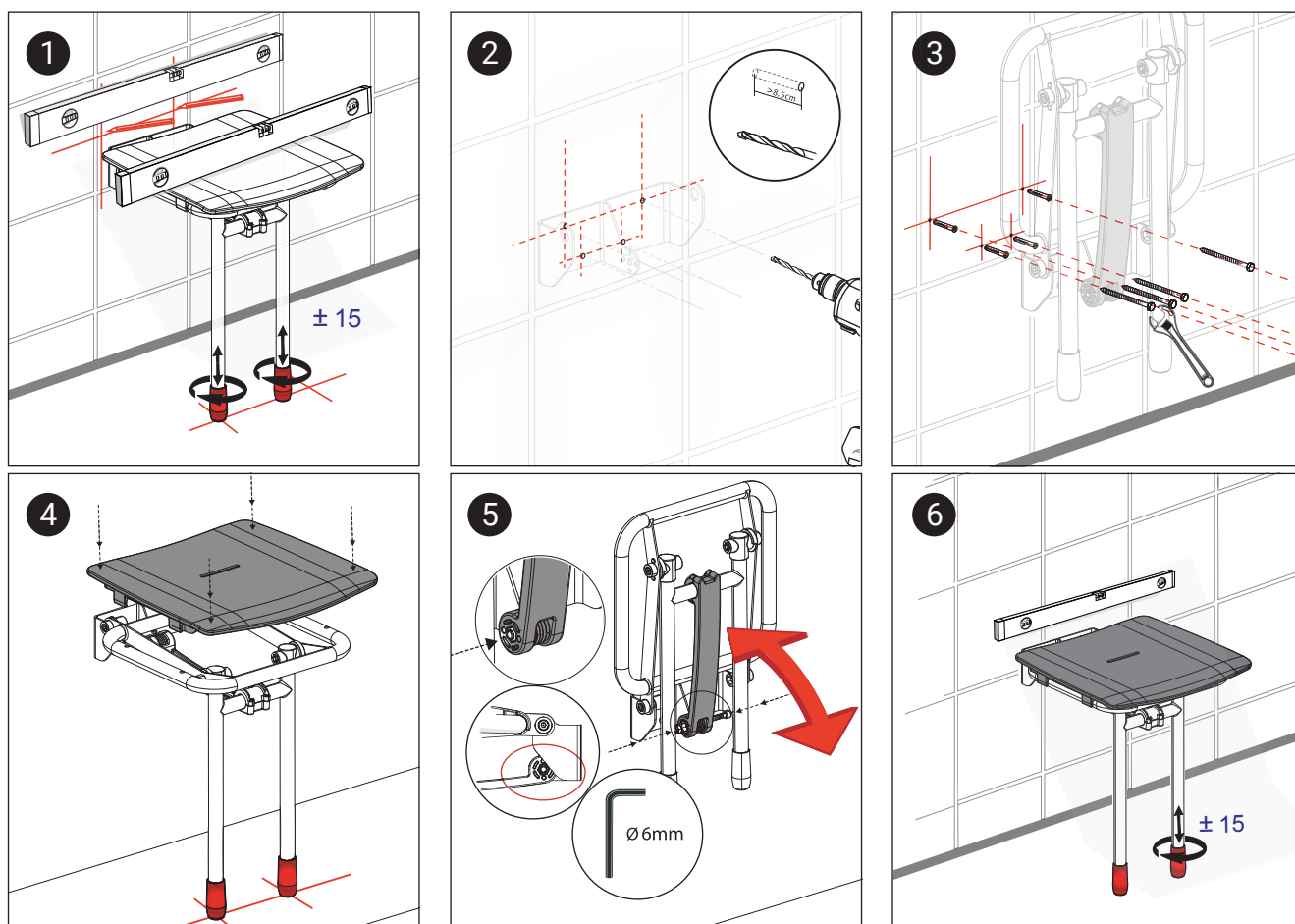

1. Marquez la position de la platine de fixation sur le mur avec le siège en position horizontale. Réglez les pieds pour faire un réglage plus fin.

2. Vérifiez les câbles et les tuyauteries. Utilisez un morceau de ruban adhésif pour marquer le mur et le percer, celui-ci protégera le carrelage de l'éclatement.


3. Utilisez des fixations murales appropriées pour fixer le support de fixation au mur. N'utilisez pas de vis à tête fraisée, car cela pourrait réduire la résistance du siège et invaliderait la garantie ou la capacité de poids indiquée.

4. Attachez l'assise au cadre.

5. Vérifiez le fonctionnement du siège, les niveaux et la position des pieds lors de la montée et de la descente. Pour régler l'inclinaison du siège, serrez le boulon sous le siège à l'aide d'une clé Allen de 6mm.

6. Finalisez l'ajustement sur le pied.

Nos sièges sont recommandés pour des applications internes. Ils peuvent être installés dans d'autres endroits, mais la durée de vie du produit ne sera pas atteinte. AKW est incapable de préciser le type de fixation à utiliser simplement à cause du grand nombre de types et de conditions de surfaces possibles.

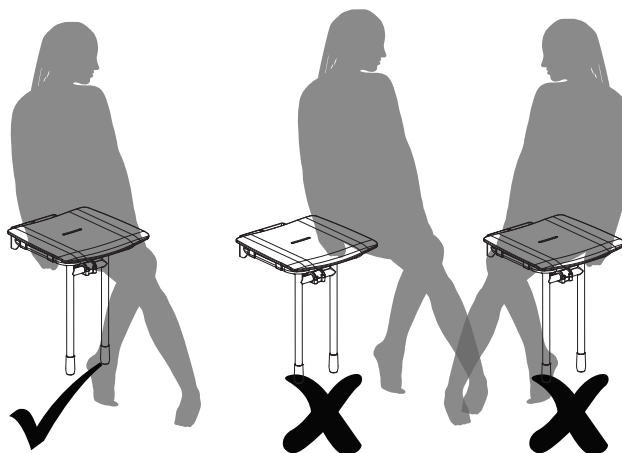

Asseyez-vous toujours au centre pendant l'utilisation.

Données techniques du siège de douche

This product is designed for a single location installation.

**Ce produit est destiné à une installation unique
Charge maximum*: 200kg**

* La charge maximale de poids est valide seulement pour ce siège.

**La fixation et l'installation sur le support
destiné au montage sont les responsabilités de l'installateur**

Gamme des températures d'opération: +5°C à +35°C

Matériaux de construction
Support du montage: SS304/201
Cadre du siège/pieds: SS304/201
Plastiques: ABS/Nylon

Utilisation du siège

Le siège de douche peut uniquement être utilisé pour les tâches auxquelles il est destiné. Ne pas se tenir debout sur le siège ni en faire un usage anormal. Cela peut réduire la résistance du siège de douche et rendra nulle toute garantie ou capacité de poids déclaré. Le siège de douche doit être vérifié dans le cadre d'un programme d'entretien planifié. Les enfants et les autres utilisateurs peuvent demander une surveillance lors de l'utilisation de ce produit. Ne jamais dépasser la charge maximale de 200 kg.

Veillez à conserver votre siège de douche AKW propre

Ce produit doit être nettoyé périodiquement pour éliminer toute accumulation de cheveux ou d'autres déchets, en utilisant des produits de nettoyage pour salle de bains domestique. N'utilisez pas de produits de nettoyage présentant une forte concentration acide, alcaline ou abrasive, car ils pourraient décolorer ou endommager le produit. Après nettoyage, rincez toujours à l'eau, puis essuyez à l'aide d'un tissu humide pour retirer tout résidu de produit de nettoyage avant de la sécher.

Désinfection

Si une désinfection est nécessaire, suivez avec précaution les procédures normales de désinfection et respectez les avertissements relatifs aux effets possibles de produits chimiques agressifs sur le plastique. AKW n'approuve et ne recommande pas le nettoyage par autoclave en raison des détériorations qu'une telle méthode peut entraîner au niveau des plastiques industriels spéciaux utilisés pour la réalisation de ce produit.

Emballage

Le siège de douche est fourni dans des sacs en polypropylène (PP) afin de conserver le produit propre jusqu'à son installation; les pièces peuvent éventuellement être emballées en vrac dans une boîte en carton. Les deux types d'emballage peuvent être recyclés et doivent être jetés conformément à la réglementation locale en matière de recyclage.

Contactez-nous



Renseignements généraux

0032 68 33 48 99

Fax

0032 68 33 16 58

Site Internet

www.akw-medicare.com

Courriel et commandes

ism@akw-medicare.com

AKW

29E rue de la Terre à brique
7522 Marquain
Belgique

Garantie

La garantie s'applique uniquement aux défauts de fabrication ou de matériaux conditionnés à une installation correcte du produit et ne s'applique pas aux blocages, à une utilisation inappropriée ou à des dommages accidentels. Cela ne couvre pas les dommages ou défauts résultant d'une installation incorrecte, d'un manque d'entretien, y compris l'accumulation de crasse, de saleté ou de calcaire et de débris d'origine hydrique. Dommages résultant d'un nettoyage inapproprié ou d'une infiltration d'eau, dommages ou défauts résultant de réparations ou de modifications effectuées par des personnes qui ne sont pas des installateurs ou des ingénieurs de maintenance.

Que faire en cas de problème?

Si vous rencontrez un problème avec ce produit, veuillez contacter votre installateur local et si cela ne résout pas le problème, contactez l'équipe technique d'AKW qui fournira des conseils supplémentaires et, si nécessaire, organisera la visite d'un ingénieur de maintenance et signaler tout problème. Dans le cadre de notre programme qualité et formation, les appels peuvent être suivis ou enregistrés. Rien de ce qui précède n'affecte vos droits statutaires.

