



# Sièges de la série 2000


## MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION




Veillez lire toutes les instructions avant l'installation et laissez ce document à l'utilisateur final pour référence future car il contient des informations importantes sur la garantie.

02130/02230/02130P/02230P  
Siège rabattable


## Taille du siège

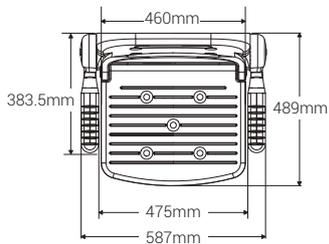










## Fixation

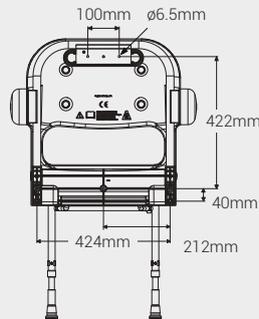

## Hauteurs minimales et maximales.

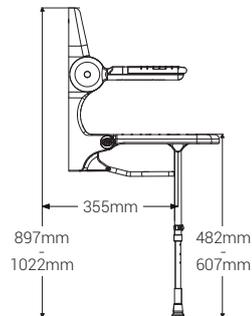

## Taille pliée

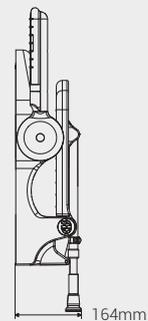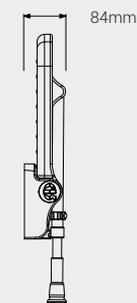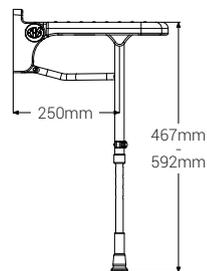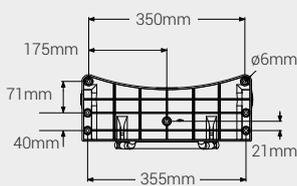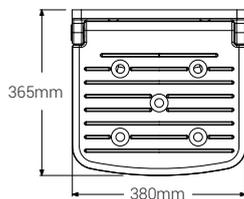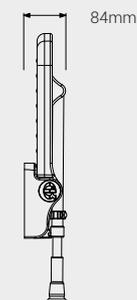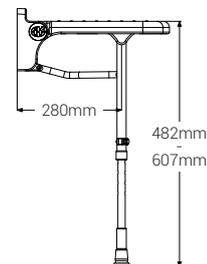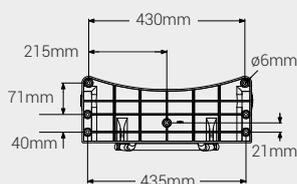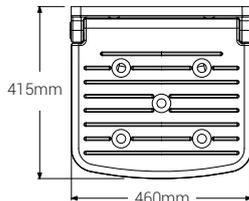02000/02200P/0200P  
Siège rabattable02010/02210P/02010P  
Siège rabattable


**Pièces incluses :** Siège/chaise série 2000, bouchons à vis (uniquement pour les sièges), réducteurs de trous.

**En option :** Coussinets de siège (P) de 15 mm d'épaisseur, capuchons de retenue, pieds courts interchangeables (04-024-069), pieds longs interchangeables (04-024-066).

### Ne jamais dépasser la capacité de poids 158kg.

Retirez tous les emballages et examinez le produit pour détecter tout dommage ou défaut de fabrication. Informez immédiatement le détaillant si vous constatez des dommages ou des défauts. Vérifiez que tous les éléments sont présents avant de jeter l'emballage. Le fabricant ne peut être tenu responsable des coûts d'installation qui pourraient résulter de l'installation de produits endommagés ou défectueux et non conformes à ces instructions.


Faites attention à vos doigts. Tenez le siège comme indiqué sur la figure 1 si vous voulez l'ouvrir lorsqu'il est inversé. Ne forcez pas les pieds pour les éloigner de la base du siège.

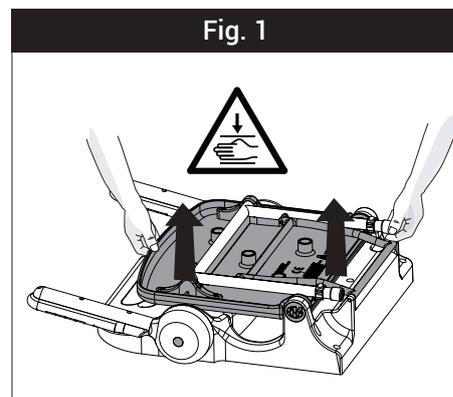

Soulevez la base du siège et les pieds ensemble.


Ce siège doit être fixé à une surface verticale finie, capable de supporter les limites de poids spécifiées en utilisant des fixations appropriées au type de surface et aux conditions de charge à appliquer. Vérifiez que la surface du sol est adaptée aux conditions de charge des pieds. Les receveurs de douche en acrylique ne sont pas recommandés.

- Ne jamais dépasser la capacité de poids de 158 kg.
- N'utilisez pas de fixations à tête fraisée.
- Veillez à ne pas endommager la surface peinte des supports.
- Veillez à ce que tous les trous de fixation soient utilisés.
- Les fixations en acier inoxydable sont recommandées mais non fournies.
- Une fois installés, vérifiez que les capuchons de pivot en plastique sont bien en place et que les clips en C des pieds sont bien fixés.
- et que les clips en C des pieds sont installés.

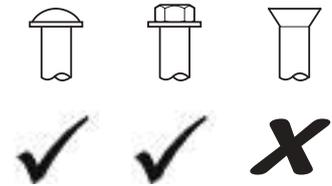

## Assemblage du coussin


- 1** Positionnez le coussin de siège sur le siège. Notez que l'avant du coussin est indiqué.
- 2** Les capuchons de retenue du coussin de siège sont installés sous le siège. Chaque coussin est doté de bandes de positionnement qui utilisent un capuchon de retenue (4 au total).
- 3** Pour installer le capuchon de retenue, il faut le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre tout en exerçant une pression ferme sur le coussin du siège. Il peut être nécessaire de maintenir le coussin de siège en position pendant la mise en place des capuchons de retenue.
- 4** Veillez à ne pas trop serrer les capuchons de retenue. Le dispositif de retenue doit être serré à la main de manière à ce qu'il soit bien ajusté.

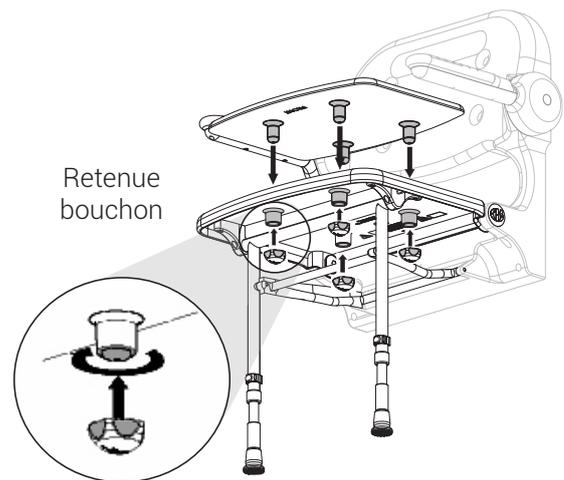

## Réglage des pieds


L'un des pieds permet un réglage fin. Certaines installations peuvent exiger qu'un pied soit légèrement plus long que l'autre, pour tenir compte de la pente d'un receveur de douche par exemple. Pour de telles installations, intervertissez les pieds de façon à ce que le pied avec la vis et l'écrou au-dessus du pied soit du côté qui doit être plus long.

Régalez la hauteur des pieds en retirant les clips en C, en faisant glisser les pieds vers l'intérieur ou l'extérieur, puis en remplaçant les clips en C (Fig. 2).

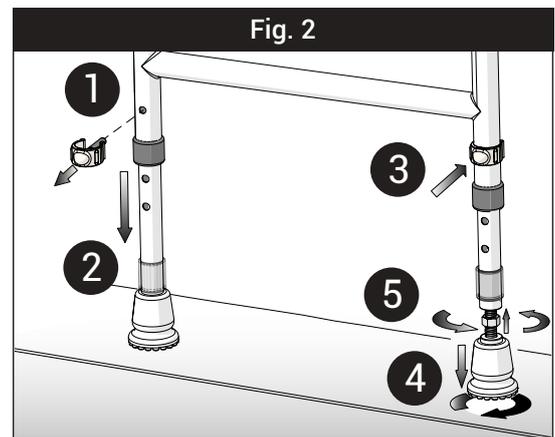


Une fois le siège fixé au mur, procédez à la mise au point du pied. Faites glisser le couvercle sur la partie intérieure du pied. Retirez l'écrou de la partie intérieure du pied, puis déroulez le pied. Mettez l'écrou en place, puis enrroulez le pied jusqu'à ce que l'écrou vienne buter contre le pied intérieur. Les deux pieds doivent être fermement posés sur le sol, c'est-à-dire que l'un d'eux ne doit pas être à peine touché.


## Installation du siège avec dossier

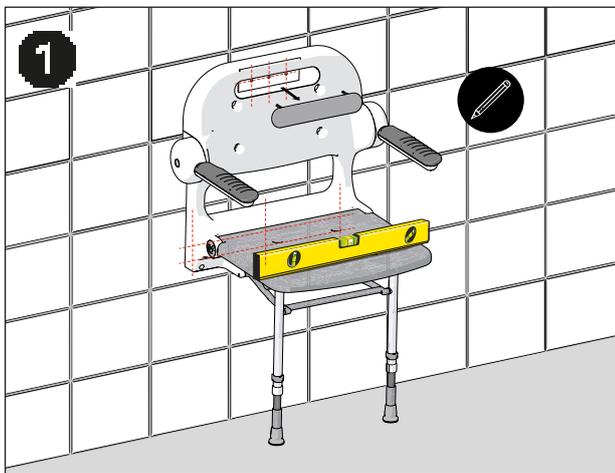


1 Marquez la position souhaitée des supports de montage sur le mur en vous assurant que le siège est de niveau. Ajustez les pieds pour effectuer un réglage plus fin.

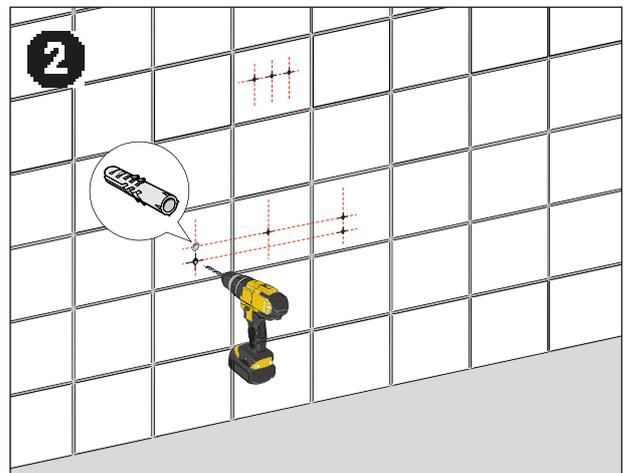

2 Vérifiez la présence de câbles et de canalisations avant de percer. Percez les trous à l'aide d'un foret approprié pour murs et carreaux et insérez les chevilles.

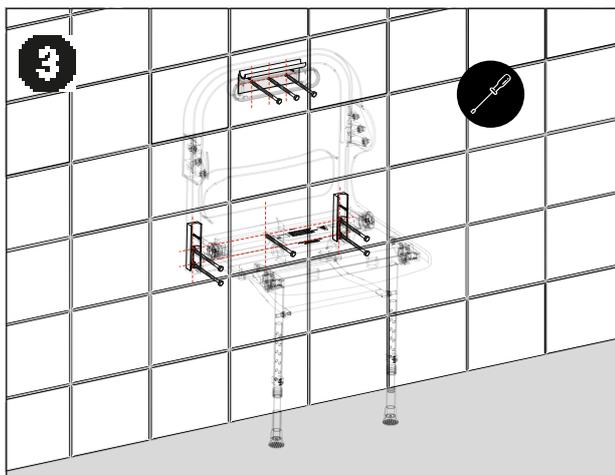


3 Utilisez des fixations murales appropriées pour fixer les supports de montage au mur. N'utilisez pas de vis à tête fraisée.

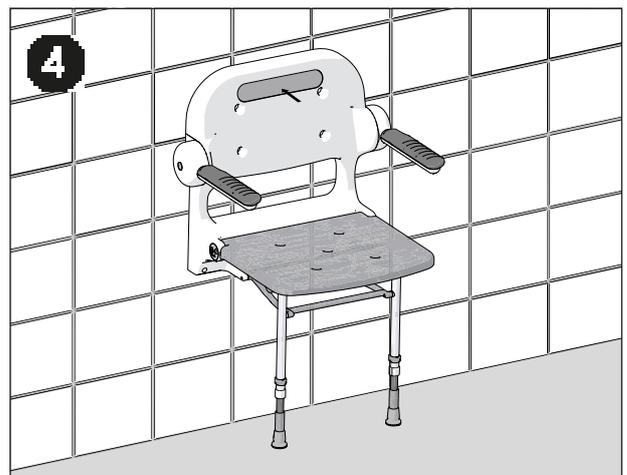


4 Assurez-vous que toutes les fixations sont solides. Remettez le cache-vis sur le dossier et assurez-vous que les pieds sont bien à plat contre la surface du sol.


## Installation des sièges

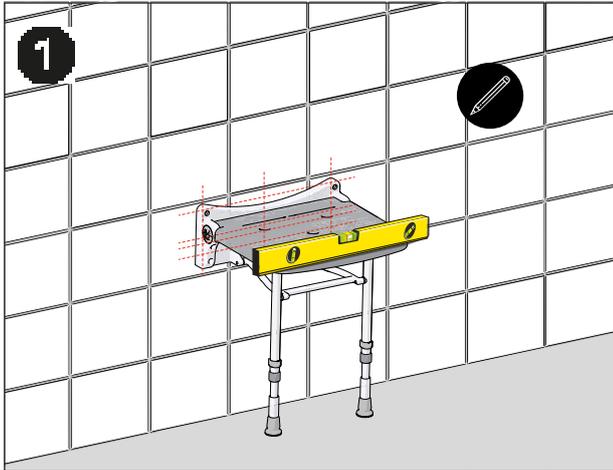


1 Marquez la position souhaitée des supports de montage sur le mur en vous assurant que le siège est de niveau. Ajustez les pieds pour effectuer un réglage plus fin.

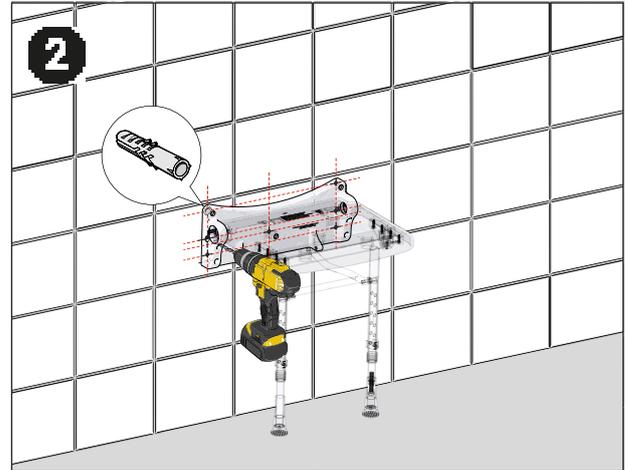


2 Vérifiez la présence de câbles et de canalisations avant de percer. Percez les trous à l'aide d'un foret approprié pour murs et carreaux et insérez les chevilles.

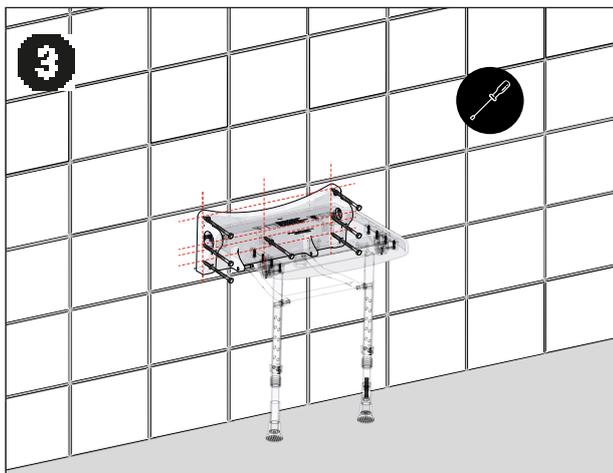

3 Utilisez des fixations murales appropriées pour fixer les supports de montage au mur. N'utilisez pas de vis à tête fraisée.

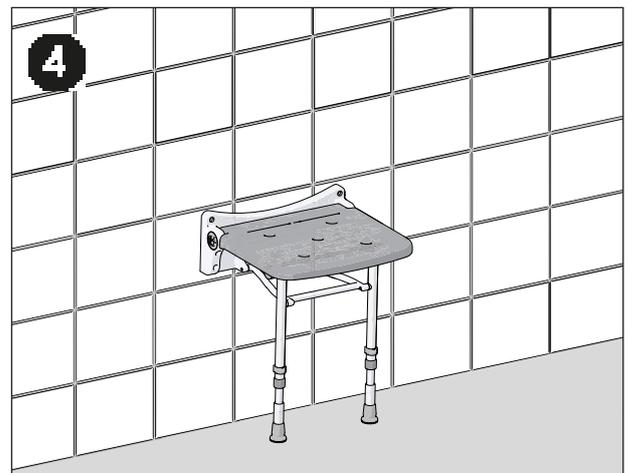

4 Assurez-vous que toutes les fixations sont solides. Fixez à nouveau les moulures du siège sur le cadre et assurez-vous que les pieds sont bien à plat contre la surface du sol.

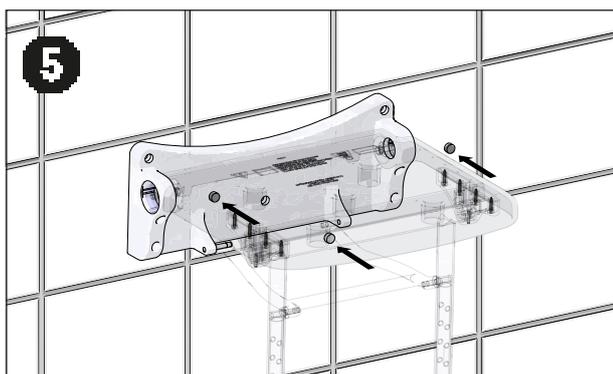

5 Le siège 2030 comprend des bouchons à vis qui doivent être insérés en dernier lieu dans les trous de vis du haut et du milieu, comme illustré sur l'image de gauche.

## Utilisation du siège de douche

Le siège de douche doit être utilisé uniquement pour la tâche qu'il est censé accomplir. Ne montez pas dessus et ne l'utilisez pas à mauvais escient. Cela pourrait avoir des effets néfastes sur ses performances et sa sécurité. Si un entretien est nécessaire, il doit être effectué par un installateur compétent.

Il est conseillé de vérifier ce produit dans le cadre d'un programme d'entretien planifié.

Les enfants et les autres utilisateurs peuvent avoir besoin d'être surveillés lorsqu'ils utilisent ce produit.

## Entretien de votre siège de douche AKW

Ce produit doit être nettoyé périodiquement pour éliminer toute accumulation de cheveux ou d'autres déchets, à l'aide de produits de nettoyage domestiques normaux. Il est important de garder les zones

Il est important de garder les zones telles que les joints et les pièces mobiles exemptes d'accumulation de saleté et de dépôts d'eau pour maintenir un bon état de fonctionnement.

Rincez toujours le siège de douche à l'eau chaude. Après le nettoyage, rincez toujours à l'eau, puis essuyez soigneusement avec un chiffon humide pour éliminer les résidus de produit de nettoyage avant de sécher.

## Désinfection

Lorsqu'une désinfection est nécessaire, les procédures standard établies pour la désinfection de l'équipement doivent être utilisées avec précaution et en tenant compte des avertissements concernant les effets possibles des produits chimiques agressifs sur les plastiques.

Ne pas utiliser de produits de nettoyage acides, alcalins ou autres, forts ou concentrés, sur un tampon abrasif, car ils pourraient décolorer ou endommager le produit. Si un nettoyage plus approfondi est nécessaire à l'aide de produits de nettoyage domestiques, faites d'abord un essai sur une petite surface.

## Emballage

L'emballage doit être éliminé conformément aux réglementations locales en matière de recyclage.

## Informations complémentaires

Ces instructions sont fournies pour conseiller les normes minimales d'installation et recommander les meilleures pratiques pour l'installation. En raison de la très grande variabilité des conditions d'installation possibles, AKW ne peut pas fournir toutes les circonstances pour l'installation. AKW ne peut accepter aucune responsabilité en rapport avec ces informations ou leur utilisation. Ces informations sont fournies à condition que la personne qui les reçoit fasse ses propres tests pour déterminer si elles conviennent à son usage particulier. Le fait de ne pas installer ce produit AKW conformément aux instructions fournies ou d'apporter des modifications non autorisées annule toute garantie et peut affecter la sécurité du produit. Rien de ce qui précède n'affecte vos droits statutaires.



# Nous contacter

## Renseignements généraux

0032 68 33 48 99

## Fax

0032 68 33 16 58

## Site Internet

[www.akw-medicare.com](http://www.akw-medicare.com)

## Courriel et commandes

[ism@akw-medicare.com](mailto:ism@akw-medicare.com)

## AKW

29E rue de la Terre à brique  
7522 Marquain  
Belgique

## Suivez-nous sur les réseaux sociaux



## Garantie

La garantie à vie s'applique uniquement aux défauts de fabrication ou de matériaux, à condition que le produit soit installé correctement une seule fois.

Elle ne s'applique pas à :

- L'utilisation inappropriée ou les dommages accidentels.
- Dommages ou défauts résultant d'une installation incorrecte.
- Le manque d'entretien, y compris l'accumulation de saleté ou les dommages résultant d'un nettoyage inapproprié.
- Dommages ou défauts résultant de réparations ou de modifications effectuées par des personnes non autorisées.
- par des personnes non autorisées.
- Cette garantie exclut l'usure générale due à l'utilisation et ne s'applique pas aux finitions de surface.

## Que faire en cas de problème ?

Si vous rencontrez un problème avec ce produit, veuillez contacter votre installateur local et, si cela ne résout pas le problème, contactez l'équipe technique d'AKW qui vous donnera des conseils supplémentaires et, si nécessaire, organisera la visite d'un ingénieur de maintenance pour signaler tout problème. Voir les T&C sur notre site Web ou notre catalogue pour de plus amples informations. Rien de ce qui précède n'affecte vos droits statutaires.