



Tabouret de douche Bama

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

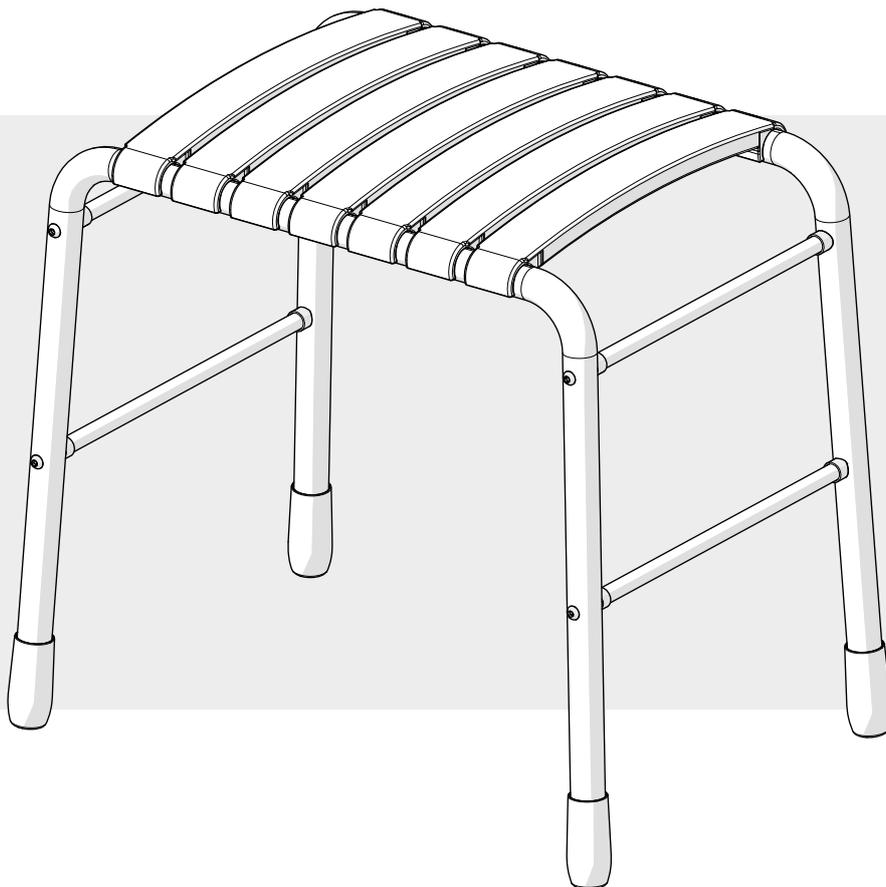


Veuillez lire toutes les instructions avant l'installation et laisser ce document à l'utilisateur final pour référence future car il contient des informations importantes sur la garantie.

Pièces fournies

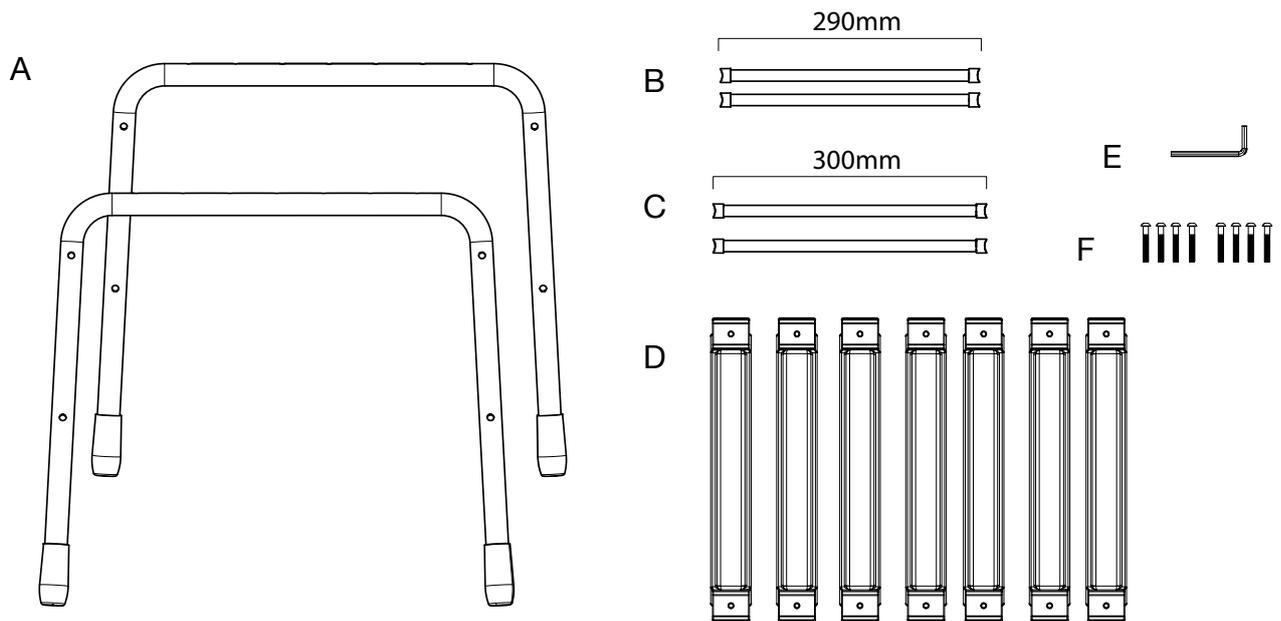

Dimensions

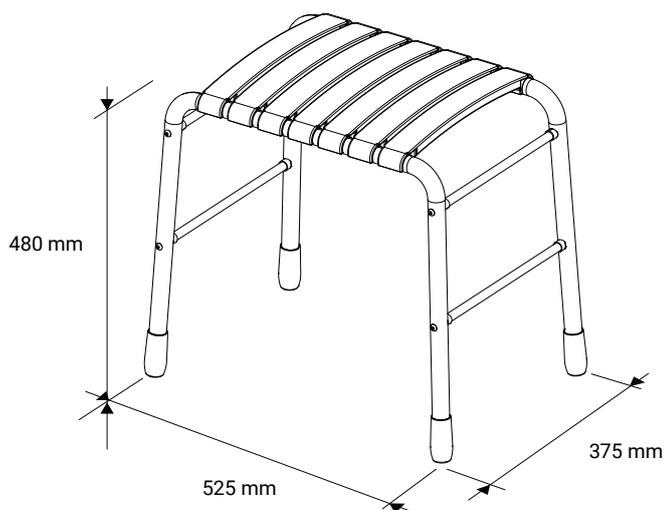

| | Parts | QTY |
|---|---------------------|-----|
| A | Structure tabouret | 2 |
| B | Supports supérieurs | 2 |
| C | Supports inférieurs | 2 |
| D | Lattes de tabouret | 7 |
| E | clé Allen | 1 |
| F | Vis SS 4x60mm | 8 |





Avant de commencer

Veillez retirer tous les revêtements de protection et examiner attentivement. Vérifiez que tous les articles sont présents avant de jeter tout emballage. Veuillez informer immédiatement le revendeur de tout dommage ou défaut. Le fabricant ne peut être tenu responsable des coûts d'installation pouvant résulter de l'installation de produits endommagés ou défectueux et qui ne sont pas conformes à ces instructions. La garantie ne couvre PAS les dommages liés à l'impact, voir les détails de la garantie.

Sécurité

- Capacité de charge de 200 kg.
- Ne vous tenez pas debout sur ce tabouret.
- Asseyez-vous toujours au milieu.
- Les enfants doivent être surveillés en tout temps lors de l'utilisation de ce tabouret.
- Éloignez les enfants des petites pièces et des emballages.
- Veuillez éliminer tous les emballages conformément aux autorités de recyclage locales.

Instructions de montage et d'entretien

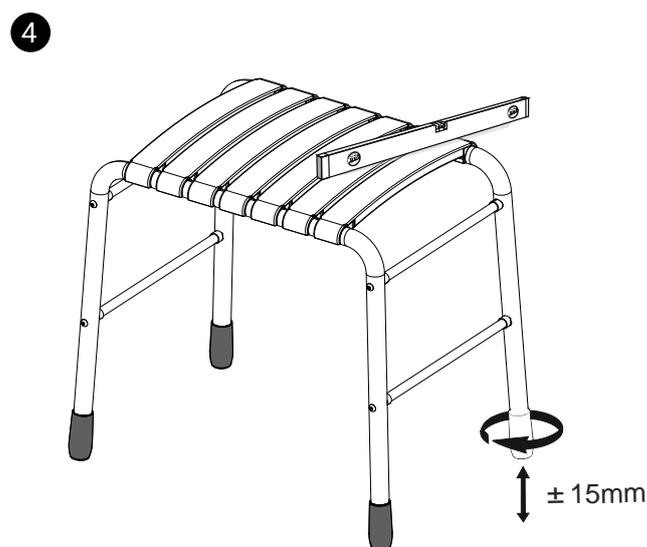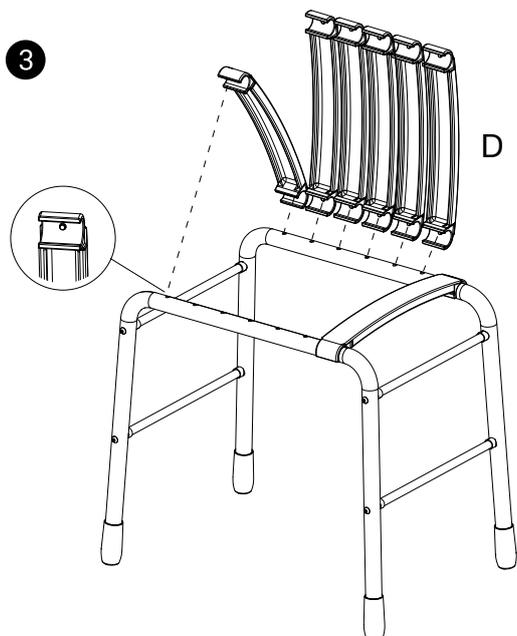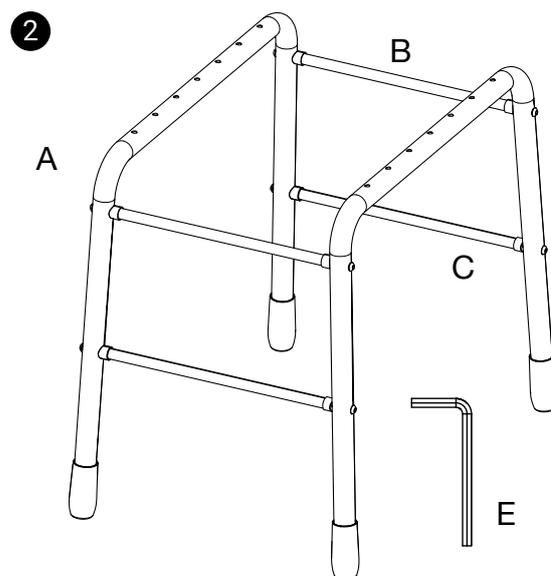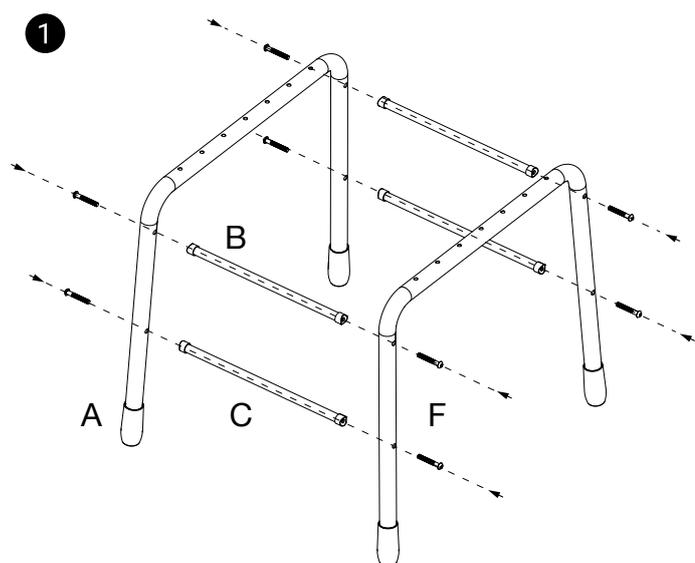

Nettoyage

Pour optimiser les performances et la durabilité des tabourets de douche, nous recommandons le programme d'entretien de base suivant:

Ce produit doit être nettoyé périodiquement à l'aide de produits de nettoyage domestiques normaux pour salle de bain. N'utilisez pas de produits abrasifs, de chiffons, d'acides forts ou concentrés, alcalins, chlorés ou d'autres produits de nettoyage abrasifs, car ils pourraient décolorer ou endommager le produit et annuleraient la garantie.

Après le nettoyage, rincez toujours à l'eau puis essuyez soigneusement avec un chiffon humide pour éliminer tout résidu de produit de nettoyage avant de sécher. Il est important de nettoyer les zones telles que les joints et de garder les pièces mobiles à l'abri de l'accumulation de crasse et de dépôts d'eau pour maintenir un bon état de fonctionnement.

Note: La durabilité des surfaces des matériaux peut être affectée par la fréquence d'utilisation de la douche, la dureté de l'eau et le type de produits de nettoyage et les méthodes utilisées. Ces questions échappent au contrôle du fabricant et ne sont pas couvertes par cette garantie.

Renseignements généraux

0032 68 33 48 99

Fax

0032 68 33 16 58

Site Internet

www.akw-medicare.com

Courriel et commandes

ism@akw-medicare.com

AKW

29E rue de la Terre à brique
7522 Marquain
Belgique



Garantie

La garantie s'applique uniquement aux défauts de fabrication ou de matériaux conditionnés à une installation correcte du produit et ne s'applique pas aux blocages, à une utilisation inappropriée ou à des dommages accidentels. Cela ne couvre pas les dommages ou défauts résultant d'une installation incorrecte, d'un manque d'entretien, y compris l'accumulation de crasse, de saleté ou de calcaire et de débris d'origine hydrique. Dommages résultant d'un nettoyage inapproprié ou d'une infiltration d'eau, dommages ou défauts résultant de réparations ou de modifications effectuées par des personnes qui ne sont pas des installateurs ou des ingénieurs de maintenance.

Que faire en cas de problème?

Si vous rencontrez un problème avec ce produit, veuillez contacter votre installateur local et si cela ne résout pas le problème, contactez l'équipe technique d'AKW qui fournira des conseils supplémentaires et, si nécessaire, organisera la visite d'un ingénieur de maintenance et signaler tout problème. Dans le cadre de notre programme qualité et formation, les appels peuvent être suivis ou enregistrés. Rien de ce qui précède n'affecte vos droits statutaires.